


GUÍA RÁPIDA DEL CARGADOR

de su sistema EM Prospera®


Es importante que recargue su sistema EM Prospera® para mantener su dispositivo y su terapia en funcionamiento. Siga los pasos a continuación para comenzar.

Componentes de carga:

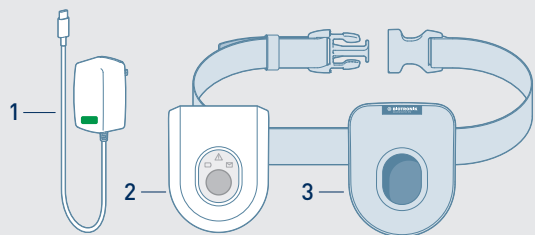

1. Cable de alimentación
2. Cargador
3. Cinturón cargador


Información sobre los iconos del cargador:

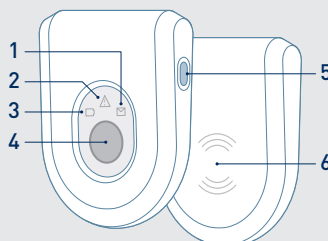


1. Consulte el programador del paciente para recibir notificaciones
2. Alarma
3. Estado de la batería del cargador
4. Botón de control
5. Conector USB
6. Indicador de posición/diana

PASOS PARA UN PROCESO DE CARGA EXITOSO


1. Desenchufe el cargador del cable de alimentación.

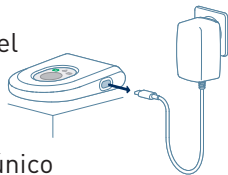

2. Encienda el cargador (un único pitido bajo): si el icono de batería **no está** iluminado, **mantenga presionado** el botón de control por 4 segundos. Si el icono de batería **está** iluminado, **presione y suelte** el botón de control. Un símbolo de batería iluminado indica que ha encendido correctamente el cargador.

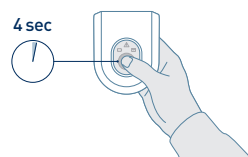


3. Inserte el cargador en el cinturón con el botón de control hacia fuera.

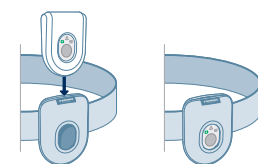


4. Presione el botón de control por **1 segundo** para activar el modo de localización, que va acompañado de pitidos repetidos y una luz verde parpadeante y se desactiva tras 75 segundos.



5. Ajuste lentamente el cargador en la posición colocando la diana sobre su implante.

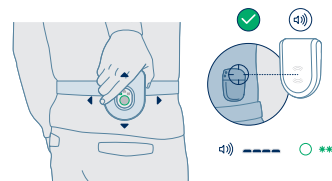


6. La señal de confirmación (un solo pitido largo) sonará para indicar que se ha iniciado la carga.

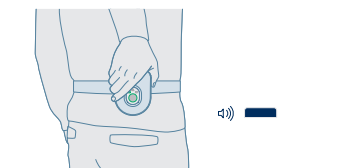

7. También puede esperar a que aparezca la notificación «Stimulator battery is charging» en el programador del paciente para confirmar que el proceso de carga ha comenzado.



8. Una vez finalizada la carga (3 pitidos ascendentes que se repiten 2 veces), retire el cargador del cinturón y vuelva a enchufarlo al cable de alimentación.

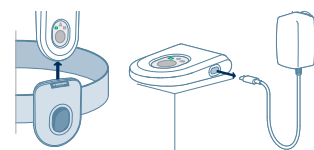

Tenga en cuenta que el cargador no podrá cargar su estimulador implantado si sigue enchufado al cable de alimentación.

Guía rápida del cargador

SEÑALES DE AUDIO

Un único pitido bajo	Indica la acción de «encendido» tras pulsar el botón de control durante 4 segundos
Pitidos repetidos	Indica que el cargador está localizando el estimulador para conectarlo correctamente
Un único pitido largo	Indica que se ha establecido la conexión entre el cargador y el estimulador
3 pitidos ascendentes que se repiten 2 veces	Indica que la carga ha finalizado
Alarmas	
Señal corta seguida de pitidos repetidos	El cargador ha perdido la conexión y está buscando el estimulador.
Tonos altos y bajos repetidos 4 veces	La batería del cargador está muy baja y necesita cargarse, el cargador se ha sobrecalentado y debe enfriarse antes de cargar, o hay un error en el cargador.
Tonos altos y bajos repetidos 2 veces	El cargador sigue conectado al cable de alimentación y, por lo tanto, no puede cargar el estimulador implantado.

SEÑALES DE LUZ

Nota: el parpadeo es una acción rápida de encendido y apagado, mientras que la intermitencia es un aumento y disminución gradual de la intensidad.

Botón de control

Luz verde parpadeante 	El cargador se está conectando al estimulador; esto ocurre con pitidos repetidos que duran un máximo de 75 segundos.
	La carga se ha completado; esto ocurre con un tono ascendente de 3 pitidos que dura 20 segundos.
Luz verde fija 	El estimulador está conectado y cargándose.

Alarma

Luz ámbar parpadeante en el símbolo de alarma 	El cargador se ha sobrecalentado; esto ocurre con tonos altos y bajos que se repiten 4 veces. Deje que el cargador se enfríe durante al menos 60 minutos antes de intentar cargar el estimulador de nuevo. Si el símbolo de alarma sigue parpadeando después de un periodo de enfriamiento de 60 minutos, póngase en contacto con su médico o con el equipo de atención Embrace One.
--	--

Estado de la batería del cargador

Luz verde intermitente 	El cargador se está cargando.
Luz verde fija 	La batería del cargador está lo suficientemente llena para cargar el estimulador.
Luz ámbar fija o intermitente 	La batería del cargador no está completamente cargada, pero cargará parcialmente el estimulador.
Luz ámbar parpadeante 	La batería del cargador está muy baja como para cargar el estimulador.

R Resumen: para más información sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos, consulte el manual técnico (MT) del producto **ONLY** correspondiente. **Indicaciones de uso:** el sistema de estimulación medular (EM) Prospera® está indicado como ayuda en el tratamiento del dolor crónico e intratable en el tronco o las extremidades, que puede incluir dolor unilateral o bilateral. **Contraindicaciones:** la implantación de un estimulador medular puede estar contraindicada en pacientes que no puedan manejar el sistema EM, que no hayan recibido un alivio eficaz del dolor durante la estimulación de prueba del sistema EM o que no sean candidatos aptos para la cirugía. Tenga en cuenta que no se ha establecido la seguridad y eficacia del sistema EM Prospera en pacientes pediátricos ni en pacientes embarazadas o en periodo de lactancia. **Advertencias:** lo mencionado a continuación puede causar interferencias electromagnéticas, interacciones adversas, estimulación insuficiente o excesiva, daños y pérdida de función del sistema o fallo de la terapia: desfibrilación externa, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (ENET), litotricia, ablación por radiofrecuencia, oxigenoterapia hiperbárica, electrocauterización, terapia de diatermia (incluidas las terapias de onda corta, microondas y ultrasonidos terapéuticos), ultrasonidos de alta potencia, radioterapia, resonancia magnética nuclear (RMN [consulte las directrices para RMN del sistema EM Prospera si desea obtener información sobre la compatibilidad condicionada con RMN del mismo]), uso de equipos portátiles de comunicación por radiofrecuencia cerca del sistema EM, uso de un cargador no suministrado por BIOTRONIK. El sistema EM Prospera puede interferir en el funcionamiento de marcapasos o DAI implantados. Se desconocen los efectos de un sistema EM Prospera implantado en otros neuroestimuladores. **Precauciones:** pueden producirse fallos en el funcionamiento del dispositivo, pérdida de la terapia y otros eventos adversos, incluidas lesiones al paciente, si el dispositivo no se manipula o utiliza correctamente, tal y como se describe en el manual técnico. Consulte el manual técnico del producto para conocer todos los mensajes de seguridad relativos al manejo del dispositivo. **Posibles efectos adversos:** riesgos asociados a la colocación del sistema EM: dolor en el lugar del implante, infección, fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR), fístula de LCR, hemorragia epidural, meningitis bacteriana, seroma, hematoma, parálisis. Riesgos adicionales asociados al uso del sistema EM: migración del electrodo; migración del estimulador; respuesta alérgica o reacción tisular al material del sistema implantado; erosión cutánea; estimulación radicular de la pared torácica; trastornos de la micción; disestesia; escaras; agotamiento prematuro de la batería; y estimulación incómoda o tratamiento ineficaz del dolor. Además, existe el riesgo de que la terapia EM no sea eficaz para aliviar los síntomas o pueda causar un empeoramiento de los mismos. Consulte el manual técnico del producto para obtener una lista completa de los posibles efectos adversos. Solicitudes de registro de marcas presentadas por BIOTRONIK SE & Co. KG para las marcas Prospera, Resilience, RESONANCE y Embrace One en los Estados Unidos; Prospera y Resilience son marcas registradas fuera de los Estados Unidos.

BIOTRONIK NRO, INC.
6024 Jean Road
Lake Oswego, OR, 97035-5571, USA
(877) 246-1122 (teléfono)
(866) 229-4744 (fax)
www.EmbraceLifeAgain.com